

MK

Gengigel® Први запчиња е гел за орална употреба кој содржи иновативен патентиран мукоадхезивен полимерен матрикс, кој ги обложува забите и непцата и има долготрајно дејство, формирајќи невидлив, флексибилен, цврст тенок слој кој има ефикасно заштитно дејство.

Индикации: Воспаленија на непца кај доенчиња, кои може да се појават при растење на првите запчиња или при повреди. Клиничките испитувања укажуваат дека со примена на **Gengigel® Први запчиња** се намалува болката, отоците и се забрзува заздравувањето.

Упатство за употреба: по темелното миење на рацете, со прст нанесете мала количина од производот, нежно втријте на непцето, сè до целосно покривање на воспаленото место. Се препорачува да се нанесува после оброк и пред спиење, за да се овозможи формирање на тенок слој и да се продолжи ефектот на ублажување на болката кај детето.

Нанесете 3 – 6 пати на ден, или по потреба.

Gengigel® Први запчиња има пријатен вкус. Не содржи алкохол и шеќери. Не содржи вештачки ароми, парабени, SLS или GMO. Клинички тестирано за доенчиња.

Контраиндикации: не употребувајте **Gengigel® Први запчиња** во случај на хиперсензитивност на некоја од состојките на производот.

Предупредувања и мерки на претпазливост: Не го употребувајте производот доколку има видливо оштетување.

Да се чува на температура, од 5°C до 40°C, заштитен од директни извори на топлина. Да не се употребува по истекот на рокот на употреба. После употреба, отстранете го вишокот од производот и затворете го. Производот е наменет само за лична употреба.

Чувајте го подалеку од дофат на деца. Доколку симптомите не исчезнат, консултирајте се со вашиот стоматолог.

Носител на решение за ставање во промет на медицинско средство:

Медис Македонија ДООЕЛ Скопје, ул. Наум Наумовски Борче 50/2-6, 1000 Скопје

Број на решение за ставање во промет на медицинско средство:

14-9379/2 на 13.10.2020

Composition: / Zusammensetzung: / Összetétel / Sestava / Sastav / Състав
/ Состав /

Principal ingredient: / Hauptinhaltsstoffe: / Fő összetevő: / Glavna sestavina:
/ Glavni sastojak: / Основна съставка: / Главна состојка: /

■ Sodium Hyaluronate

Other ingredients: / Sonstige Inhaltsstoffe: / Egyéb összetevők: / Druge sestavine:
/ Ostali sastojci: / Други съставки: / Други состојки: /

■ Aqua, PEG 400, Xylitol, Polyvinyl Alcohol, Cellulose Gum, PEG 40
Hydrogenated Castor Oil, PVP, PVM/MA copolymer, VP/Eicosene Copolymer, Glyceryl
Laurate, Carbomer (Polycarbophil), Sodium Saccharin, Sodium Phosphate,
Glycerophosphocholine, Trisodium Phosphate, Sodium Lactate, Disodium EDTA.

It may contain ■ Lactic Acid, Sodium Hydroxide